

Anlegen der VRTX Zervikal- orthese Zuhause:

VRTX Zervikalorthese VRTX TX Zervikalorthese



Zervikal



TX


1



PLATZIERUNG DER HINTEREN SCHALE:

Kopf in neutraler Position, dann die hintere Schale mittig am Kopf, genau zwischen den Ohren, und am Übergang zum Rücken anlegen.

2

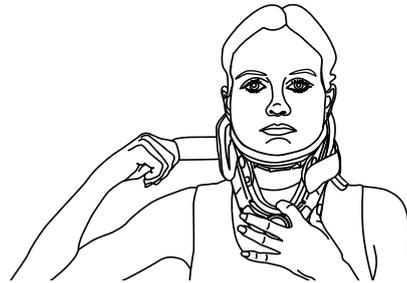

PLATZIERUNG DER VORDEREN SCHALE:

Kopf in neutraler Position, die Schale mittig unter das Kinn setzen, mit den Seiten nach oben und über den Schlüsselbeinen.


3



FIXIEREN DER GURTE

Die vordere Schale festhalten und die Gurte an beiden Seiten einfädeln. Jeden Gurt einzeln gleichmäßig anziehen und eventuell nachjustieren.

4

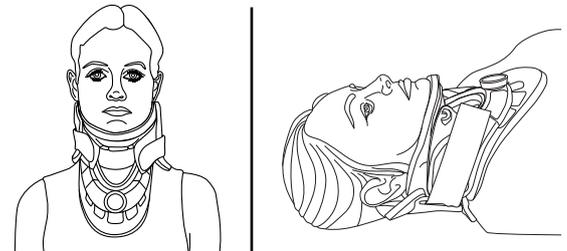

KORREKTE PLATZIERUNG

Beide Gurte müssen festsitzen, so dass die Schalen eng anliegen. Die Nackenstütze kann in aufrechter oder liegender Position getragen werden.

✓

ÜBERPRÜFEN DER KORREKTEN ANLAGE:

- 1. Kinnpunkte verdeckt?** Das Kinnstück sollte bündig mit dem Kinn abschließen und die Kinnpunkte auf dem Polster verdecken.
- 2. Richtige Höhe?** Die Höhe der Cervikalstütze ist korrekt, wenn der Kopf in neutraler Position gesichert ist.
- 3. Sitzt die Stütze fest?** Die Gurte sind gleichmäßig fest, evtl. nachjustieren. Der Kopf ist in neutraler Position gesichert.
- 4. Atemwege frei?** Die Rückseite der Kinnschale darf den Kehlkopf nicht berühren. Wenn der Kehlkopf Kontakt hat, muss man die Schale lösen, neu positionieren und in der korrigierten Position fixieren.



HOHE QUALITÄT TRIFFT EFFEKTIVE HEILUNG

VERWENDUNGSZWECK

Unterstützung der Halswirbelsäule.
Einschränkung nicht gewünschter Bewegungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch.
Mit ärztlicher Zustimmung kann der Patient die Nackenstütze zur persönlichen Hygiene selbstständig an- und ausziehen.
Eine umfassende Einweisung in die Handhabung des Hilfsmittels muss vor dem ersten Gebrauch durch Fachpersonal erfolgen. Diese Anleitung dient als Richtlinie und ist keine medizinische Empfehlung.
Bei schweren Erkrankungen empfehlen wir dringend vor der Anwendung des Produkts einen Arzt zu konsultieren. Die korrekte Passform ist Voraussetzung für die Wirksamkeit.



PFLEGEHINWEISE

- Bei Verwendung durch einen Patienten ist keine Wartung/Desinfektion erforderlich.
- Handwäsche bei 30° Grad ist mit handelsüblichem Feinwaschmittel möglich, an der Luft trocknen. Keine Bleichmittel oder andere Chemikalien verwenden.
- Die Polster sollten bei sichtbarer Verschmutzung gewaschen oder ausgetauscht werden. Neue Polster erhalten Sie per Mail: bestellungen@aspenmp.de, telefonisch unter +49 (0) 6155-897-91-22 oder im Webshop unter www.schmerzloesungen.de

KOMFORTABLE ERSATZPOLSTER

Die Polster bestehen aus atmungsaktivem Material, das Feuchtigkeit ableitet. Sie sind sanft an der Haut.



NICHT AUS NATURKAUTSCHUK HERGESTELLT



OPTIMALE HEILUNGSUMGEBUNG

Die VRTX Zervikalorthesen schränken die Bewegung ein, um eine kontrollierte und effektive Genesung zu erreichen.

